



ARISTORM PRO 6

by VeneSpa



Equipo estético multifuncional de uso profesional incorporado con onda ultracavitadora, radiofrecuencia corporal y facial, vacumterapia y Lipoláser.

TABLA DE CONTENIDOS

- 03** Introducción
- 04** Ultracavitación
- 05** Radiofrecuencia Corporal
- 06** Vacumterapia + Radiofrecuencia
- 07** Radiofrecuencia Facial
- 08** Lipolaser
- 09** Contenido y Dimensiones
- 10** Contáctanos

"Estamos comprometidos con la belleza sin riesgos"

INTRODUCCION

Los tratamientos estéticos basados en tecnología no invasiva son cada vez más populares en el mundo de la belleza. Y nuestro modelo Aristorm Pro 6, está diseñado para ayudar eficazmente a reafirmar la piel, moldear el cuerpo y combatir el envejecimiento de forma segura y sin riesgos para la salud. Por lo tanto, este equipo es un reemplazo eficaz de los tratamientos invasivos de cuidado facial y corporal.



Resuelve condiciones estéticas frecuentes de la piel y el cuerpo. Este equipo no requiere inyección, ni medicación, por lo que no tiene efectos secundarios. Se utiliza externamente durante todo el proceso y ofrece efectos observables en pocas sesiones.

Nuestra línea de equipos Aristorm Pro incorpora la última tecnología en ondas de Ultracavitación y Radiofrecuencia Inteligente, brindando mejores resultados en comparación a versiones anteriores. Además, están confeccionados con materiales ultra resistentes que garantizan larga durabilidad mientras ofrecen máximo desempeño. Es un equipo de belleza profesional, que necesita ser manejado por profesionales con la formación adecuada.



ULTRACAVITACION

ULTRACAVITACION 2.5



El efecto de la Ultracavitación de 40 Khz versión 2.5, apunta únicamente a los tejidos adiposos de baja densidad debido a su frecuencia específica y protege tejidos de alta densidad como nervios y tejidos vasculares.

Frecuencia: 40 Khz
Potencia: 30 W

La onda ultrasónica es usada para provocar un impacto en las células adiposas y generar fricción una vez que las ondas entran al cuerpo, lo cual calienta efectivamente el adiposito, consumiendo así el agua en su interior y contrayéndolo al máximo. Luego, las células adiposas implosionan para provocar el efecto de eliminación de grasa.

Decenas de miles de pequeñas burbujas, llamadas burbujas de ultracavitación son producidas por la vibración de líquidos. Cuando las burbujas implosionan, se genera presión entre decenas a centenares de MPa y provoca ruido ultrasónico que puede ser percibido por el paciente.



RADIOFRECUENCIA CORPORAL



Frecuencia: 1Mhz
Potencia: 30 W

La Radiofrecuencia calienta las capas más profundas de la piel, estimula el colágeno para que se regenere y reorganice en la dermis y promueve la circulación sanguínea, lo que puede lograr resultados de reafirmación y antienvjecimiento.

Su onda electromagnética puede penetrar directamente en la piel y utiliza la resistencia formada por ésta para producir energía, lo que provoca el aumento de la temperatura. Ésta función tiene dos efectos terapéuticos: reafirma la piel y elimina grasa localizada.

Radiofrecuencia Inteligente 3D

La Radiofrecuencia de última generación de nuestra línea Aristorm Pro, emite energía al contacto con la piel, ajustando de forma automática la intensidad según la temperatura corporal del paciente. Esta novedosa funcionalidad hace un uso más eficiente de la energía, logrando mejores resultados y alargando la vida útil del equipo y sus componentes.

05

Parámetros

Frecuencia de la Radiofrecuencia:

1 Mhz

Potencia: 50 W

Vacío: <-80kPa

Presión: >250kPa

Flujo de aire: >10L/minuto

Nivel de ruido: <70db (30 cm de distancia)



VACUM + RF

La combinación perfecta de vacumterapia y radiofrecuencia ayuda a eliminar grasa y, al mismo tiempo, reafirmar la piel, aumentar la elasticidad, promover el metabolismo y, en última instancia, fortalecer la constitución corporal.

Las placas de Radiofrecuencia de diseño único integran el cabezal de vacum como un todo, en el que la Radiofrecuencia y el vacío pueden existir de forma independiente y también complementaria. En comparación con la radiofrecuencia ordinaria, esta combinación puede moldear el cuerpo de una manera más efectiva, más rápida y uniforme.

RADIOFRECUENCIA

FACIAL



La Radiofrecuencia facial puede emitir ondas de radio con una frecuencia de un millón de veces por segundo, las cuales penetran la capa de la epidermis directamente hacia la dermis, calentando las células y estimulando el crecimiento de fibras de colágeno más compactas y elásticas.

El efecto de la onda electromagnética puede reducir arrugas, aclarar manchas, otorgar luminosidad y elevar el contorno facial.

Frecuencia: 3 Mhz
Potencia: 30 W

Radiofrecuencia Contorno de Ojos

Sus pines de tamaño reducido se adaptan a la zona más sensible del rostro para aliviar la fatiga ocular, las ojeras y las bolsas alrededor de los ojos. Además acelera la circulación sanguínea y previene la pigmentación

Cuando los electrodos del cabezal tocan la superficie de la piel, las salidas de RF del cabezal multipolar tienden a ser uniformes a pesar de que la piel no es absolutamente plana y existen diferencias de contacto resultantes, lo que evitará la aparición de sensaciones irritantes.

07



LIPOLASER

Parámetros

Longitud de Onda: 635nm-650nm

Potencia de cada luz: 5mw

Potencia de cada panel Grande:
48mw

Potencia de cada panel Pequeño:
5mw

Potencia de salida: 100 VA



Utiliza un láser LED de 635nm - 650nm para calentar las células grasas en la zona objetivo y finalmente descomponerlas. En un período de tiempo muy corto, la acumulación de grasa es absorbida y excretada por el proceso metabólico natural del cuerpo. La tecnología láser puede generar calor en el área de tratamiento para estimular la producción de colágeno, brindando así los efectos de suavizar y tensar la piel, además de dar forma al cuerpo.

08

El láser de baja energía (estimulación biológica) estimula las células e induce una serie de reacciones fisiológicas mediante la liberación de energía, incluida la promoción de la circulación sanguínea local, la regulación de la función celular, la mejora de la función inmunológica y la promoción del metabolismo celular.

CONTENIDO Y

DIMENSIONES

Voltaje: 110V-240V
Potencia: 190W

Funciones

- 1 Radiofrecuencia Contorno de Ojos
- 2 Radiofrecuencia Facial
- 3 Radiofrecuencia Corporal
- 4 Ultracavitación
- 5 Vacumterapia + Radiofrecuencia
- 6 Lipolaser (6 Pads G/ 2 Pads P)



09



Bandas Elásticas



1x Cable de Corriente

CONTACTANOS



+58 (414) 2087903



@Venespaa



Venespa



venespavenezuela@gmail.com



Venezuela (Caracas), Colombia
(Bogotá), Estados Unidos (Miami, FL)

10